

# CANNABIS

## TEST SALIVAIRE ONETEST+



### Généralités

Le TEST SALIVAIRE CANNABIS ONETEST+ détecte le  $\Delta^9$ -Tétrahydrocannabinol (THC), molécule mère du cannabis, à une concentration seuil de 15 ng/mL.

### Contenu de la boîte

La boîte contient le matériel nécessaire pour un test : un sachet aluminium contenant un test de dépistage et son collecteur salivaire.

### Précautions d'emploi

Veuillez lire toutes les informations contenues dans cette notice avant d'effectuer le test.

1. Ce test est destiné à un usage externe exclusivement. NE PAS AVALER.
2. Le test n'est interprétable que si le mode d'emploi est scrupuleusement respecté. Bien respecter les temps indiqués.
3. À conserver entre +2 °C et +30 °C. NE PAS CONGELER.
4. Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur l'étiquette et sur le sachet protecteur, ou si celui-ci est endommagé.
5. Ne pas réutiliser ce test.
6. Tenir hors de la portée des enfants.
7. Après usage, jeter tous les composants à la poubelle.

### Mode d'emploi

Attendre que le dispositif atteigne la température ambiante entre 15 et 30°C avant de commencer le test.

1. Ne pas manger, fumer ou boire 10 minutes avant de faire le test.
2. Utilisez le dispositif directement après avoir ouvert le sachet. Le test doit être utilisé maximum une heure après l'ouverture du sachet.
3. Enlevez le collecteur de la cassette. Veillez à retirer le capuchon.
4. Frottez le collecteur à l'intérieur des joues et des gencives puis placez le collecteur sur et en dessous de la langue afin de récolter un maximum de salive. Ne mordez pas l'éponge car elle pourrait se briser. Retirez le collecteur lorsque l'indicateur de saturation est devenu rose/rouge (environ 30 secondes).


*Note : Si l'indicateur de saturation n'est pas devenu rose/rouge, remplacez le collecteur dans la bouche et continuez à collecter la salive.*

5. Insérez le collecteur dans la cassette.

*Note : Lors de l'insertion du collecteur dans la cassette, insérez la partie saillante de la tête du collecteur dans l'espace réservé ❶, puis appuyez sur la queue du collecteur pour le fixer ❷.*

6. Faites glisser le capuchon bleu dans la direction de la flèche rouge jusqu'au butoir (flèches bleues).

7. Placez le test sur une surface plate lorsque ce dernier migre. Un résultat négatif peut être lu dès l'apparition des bandes dans la zone C (contrôle) et T (test). Les résultats positifs sont à interpréter après 10 minutes. Ne lisez pas les résultats après 20 minutes.

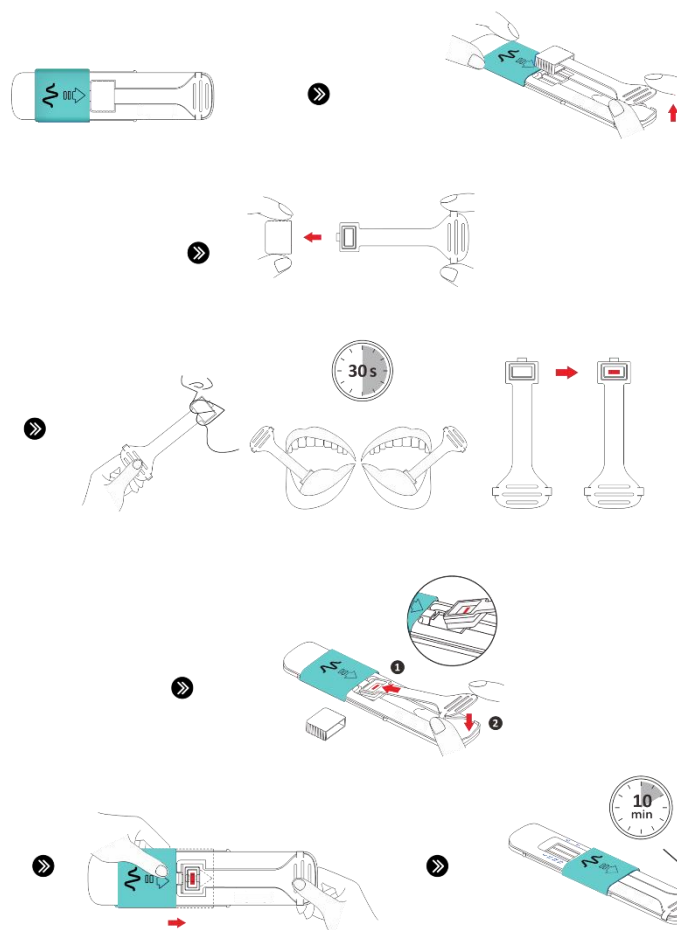

## Interprétation des résultats

### POSITIF

#### BANDE TEST (T) NON VISIBLE

Le test est positif lorsqu'une bande apparaît à côté du repère C (contrôle) et qu'il n'apparaît pas de bande au niveau du repère T correspondant.

Vous ne devriez pas entreprendre une action nécessitant attention ou concentration soutenue telle que la conduite d'un véhicule.



Positif

### NÉGATIF

#### BANDE TEST (T) VISIBLE

Le test est négatif lorsqu'une bande apparaît à côté du repère C (contrôle) et qu'il apparaît également une bande au niveau du repère T (test). L'intensité de la ligne test est variable : même très pâle, l'apparition d'une ligne indique un résultat négatif.



Négatif

### INVALIDE

#### BANDE C NON VISIBLE

Le test est invalide lorsque la bande contrôle (repère C) n'apparaît pas. Le plus souvent, cela se produit lorsque les indications de la notice ne sont pas suivies. Lire la notice et recommencer avec un nouveau test.



Invalide

## Fiabilité du test

90 échantillons de salive ont été collectés auprès de sujets ayant consommé du cannabis. Ces échantillons ont été soumis au TEST CANNABIS SALIVAIRE ONETEST+ et les résultats ont été confirmés par chromatographie en phase liquide-spectrométrie de masse (LC-MS/MS). Les résultats suivants ont été obtenus :

| Test cannabis salivaire OneTest+ THC15            | Résultats | Positif | Négatif | Résultats Totaux |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------------------|
|                                                   | Positif   | 43      | 0       | 43               |
|                                                   | Négatif   | 2       | 45      | 47               |
| Résultats totaux                                  |           | 45      | 45      | 90               |
| % Accord avec le test cannabis salivaire OneTest+ |           | 95.6%   | >99%    | 97.8%            |

### Spécificité analytique

Le tableau suivant répertorie les composés et leurs concentrations respectives qui donnent un résultat positif avec le TEST CANNABIS SALIVAIRE ONETEST+ à 10 minutes :

| Composés                              | Concentration (ng/mL) |
|---------------------------------------|-----------------------|
| $\Delta^9$ -THC                       | 15                    |
| 11-nor- $\Delta^9$ -THC-9 COOH        | 12,5                  |
| ( $\pm$ )-11-Hydroxy- $\Delta^9$ -THC | 400                   |
| Cannabinol                            | 20,000                |
| (-)- $\Delta^8$ -THC                  | 100                   |
| ( $\pm$ )- $\Delta^8$ -THC            | 40                    |

## QUESTIONS & RÉPONSES

### Comment fonctionne le TEST CANNABIS SALIVAIRE ONETEST+ de Medisur ?

En utilisant des anticorps dirigés contre le  $\Delta^9$ -THC, le TEST CANNABIS SALIVAIRE ONETEST+ révèle la présence de ce composé, présent dans la marijuana, dans la salive. Si la concentration du  $\Delta^9$ -THC est supérieure ou égale à 15 ng/mL, le test est positif.

### Quand peut-on le réaliser ?

Le test peut être réalisé sur un échantillon de salive obtenu à tout moment de la journée. Mais il ne faut pas manger, boire ou fumer 10 minutes avant de faire le test.

### Quelle est la durée de détection du cannabis ?

Le TEST CANNABIS SALIVAIRE ONETEST+ de Medisur permet de détecter la consommation de cannabis à partir de 30 minutes jusqu'à 12 heures en moyenne. La durée de détection varie selon la consommation.

### Peut-on obtenir des résultats erronés ?

Pour que le test soit fiable, les indications de la notice doivent être respectées scrupuleusement. La quantité et la qualité de la salive prélevée seront décisives pour obtenir un résultat correct. En effet, le résultat peut être faussé si le test est mouillé avant de la faire, ou si la quantité de salive imprégnée par le test n'est pas suffisante. Il est donc important de retirer le collecteur de salive seulement lorsque l'indicateur de saturation est devenu rose/rouge.

### Je n'ai pas assez imprégné de salive le TEST CANNABIS SALIVAIRE ONETEST+ de Medisur. Obtiendrai-je un résultat précis ?

Non, si le volume de salive n'est pas suffisant, le test peut donner un faux négatif ou être invalide.

### À quoi sert la ligne qui apparaît à côté du repère C (Contrôle) ?

Si la ligne à côté du repère C apparaît, cela signifie que le TEST CANNABIS SALIVAIRE ONETEST+ de Medisur a fonctionné. Si la ligne à côté du repère C n'apparaît pas, cela signifie que le test n'a pas fonctionné. Il faut alors recommencer avec un nouveau test.

### J'ai lu le résultat après 20 minutes. Obtiendrai-je un résultat fiable ?

Non, le résultat doit être lu 10 minutes après la réalisation du TEST CANNABIS SALIVAIRE ONETEST+ de Medisur, conformément aux indications d'utilisation du test données dans la notice. Au-delà de 20 minutes, l'interprétation des résultats n'est plus fiable.

### Comment interpréter le test si l'intensité des lignes T et C sont différentes ?

L'intensité des lignes n'a aucune importance pour la lecture des résultats. Les lignes doivent seulement être homogènes et continues. L'apparition des lignes T et C d'une faible intensité est considérée comme un résultat négatif.

### Que faut-il faire si le résultat est positif ?

Si le résultat est positif, cela signifie que le test a détecté la présence de THC dans la salive. Vous ne devriez pas entreprendre une action nécessitant toute votre attention ou concentration comme la conduite d'un véhicule.

### Que faut-il faire si le résultat est négatif ?

Si le résultat est négatif et que vous n'avez pas consommé de THC, il n'y a aucune précaution particulière à prendre.

### Important

Un résultat négatif ne signifie pas nécessairement que l'échantillon ne contient aucune substance psychoactive. Des substances dont la concentration est inférieure au seuil de détection du test peuvent être présentes dans l'échantillon de salive.

EN CAS DE DOUTE, NE CONDUISEZ PAS !

### IMPORTANT

Un résultat négatif ne signifie pas nécessairement que l'échantillon ne contient aucune substance psychoactive. Des substances dont la concentration est inférieure au seuil de détection du test peuvent être présentes dans l'échantillon de salive.

EN CAS DE DOUTE, NE CONDUISEZ PAS !

## INDEX DES SYMBOLES

| Symboles | Signification            | Symboles | Signification                                |
|----------|--------------------------|----------|----------------------------------------------|
|          | Nbre de tests par sachet |          | Conserver entre 2 et 30°C                    |
|          | Ne pas réutiliser        |          | Lire attentivement le mode d'emploi          |
|          | Numéro de lot            |          | Utiliser avant le                            |
| REF      | Référence                |          | Pour un diagnostic <i>in vitro</i> seulement |
|          | Marquage CE              |          | Fabricant                                    |
|          |                          |          |                                              |

Référence : DTHC-SC81 Révision : 08/2024

Fabricant : MEDISUR  
Pôle Morandat  
1480 avenue d'Arménie  
13120 Gardanne

[contact@medisur.fr](mailto:contact@medisur.fr)  
+33 4 42 96 09 68  
[www.medisur.fr](http://www.medisur.fr)

