

AVANT UTILISATION :

Attendre 10 min après la dernière ingestion d'alcool ou d'autres substances (spray, médicament...) avant d'effectuer un test. L'alcoolémie maximale est atteinte 45 min à 60 min après le dernier verre d'alcool.

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION :

Pour les conducteurs novices avec un permis probatoire, **ne pas dépasser les 0.2 g/L de sang.**

Pour les conducteurs confirmés, **ne pas dépasser les 0.5 g/L de sang.**

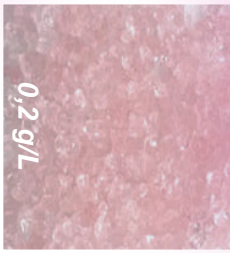
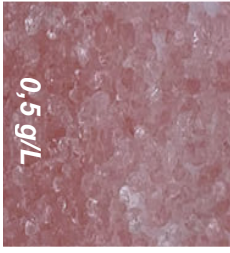
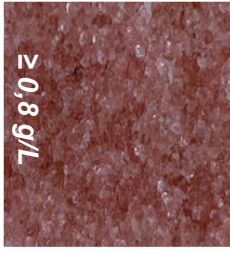
L'ALCOOL EST L'UNE DES PREMIÈRES CAUSES D'ACCIDENTS MORTELS SUR LA ROUTE.

RÉSULTAT

Comparer la couleur de votre éthylotest au nuancier ci-dessous et choisir le cas de figure qui est le plus proche de la couleur présente sur votre éthylotest.

A
Permis probatoire


Conducteur confirmé

Conduite autorisée		Conduite autorisée
	< 0,2 g/L	
		
Ne pas conduire	0,2 g/L	
		
Ne pas conduire	0,5 g/L	
		
Ne pas conduire	≥ 0,8 g/L	

Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas


MEDISUR

ETHYLOTEST SANS BALLON

Usage unique
Sans chrome

Seuils
0.2 g/L
0.5 g/L

FABRIQUÉ
EN FRANCE

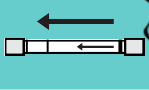
LE SEUL TEST
POUR LES JEUNES CONDUCTEURS
ET LES CONDUCTEURS
EXPÉRIMENTÉS

UTILISATION



1 
Tenir l'éthylotest pendant 45 secondes dans votre main fermée.

2 
Presser fermement les 2 extrémités de sûreté afin de percer l'aluminium.

3 
Inspirer profondément puis souffler lentement dans le sens indiqué par la flèche
AVERTISSEMENT : le souffle doit être continu et sans interruption

4 
Cesser de souffler dès que le mot **STOP** apparaît sous la ligne noire.

Utilisation : 10°C à 40°C

Stockage : -20°C à 70°C

0,10 mg/L d'air expiré = 0,2 g/L de sang

0,25 mg/L d'air expiré = 0,5 g/L de sang

Distribué par
 **MEDISUR**
1480 avenue d'Arménie
13120 Gardanne



Fabriquée par TURDUS TESTERS OF CAPACITY
REF : PHARM-PSY-U-EHTYLO GRAD FR REV: 06/26

LECTURE DU RÉSULTAT :

1. Attendre que le trait supérieur redevienne entièrement noir. **En présence d'alcool, le réactif se colore en rose.**

2. Comparer votre éthylotest au nuancier présent au verso, selon si vous disposez d'un permis probatoire ou d'un permis confirmé et choisir le cas de figure qui est le plus proche de la couleur présente sur votre éthylotest :

Permis probatoire (A) :

Seule la première nuance (la plus claire, < 0,2 g/L) vous autorise à prendre le volant.

DÈS QUE LA COULEUR CHANGE, LA CONDUITE EST INTERDITE

Conducteur confirmé : La conduite est autorisée pour les deux premières nuances (jusqu'à 0,5 g/L).

AU-DELÀ, NE CONDUISEZ PAS.

3. Au-delà de 10 min l'interprétation du résultat n'est plus possible.

Les résultats de ce test ne peuvent en aucun cas être opposables à ceux obtenus par les forces de l'ordre, lors de contrôles officiels. Les décisions prises par l'utilisateur en fonction du résultat de ce test sont sous son entière responsabilité. Elles ne peuvent engager celles du fabricant et/ou de ses distributeurs. Les éthylotests chimiques sont des indicateurs d'alcoolémie et non des instruments de mesure.

RISQUES :

Au-delà de 0.5 g d'alcool par litre de sang, les risques d'accidents sont multipliés par 3.

Conduire après avoir consommé de l'alcool fait courir des risques extrêmes au conducteur, ses passagers et tous les usagers de la route.

PRÉCAUTIONS :

*Ce produit est un tube en verre. **Tenir hors de portée des enfants.** Ne pas utiliser le test si les membranes d'aluminium sont déjà perforés, si le verre est fêlé ou cassé, ou si le réactif est déjà rose. Ne pas diriger le test vers une personne pendant le souffle. Ne pas inspirer. Ne pas avaler. En cas de contact du réactif avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l'eau et demander si besoin un avis médical. En cas d'ingestion, appeler un service d'urgence médicale (par exemple le 15 ou le 112). À jeter dans une poubelle après utilisation en raison de la présence de produits chimiques contenu dans l'éthylotest. Une utilisation non conforme à la notice et/ou le non-respect dégage le fabricant et ses distributeurs de toute responsabilité.*

UNE DOSE DE BAR

Un seul verre suffit pour atteindre environ 0,25 g/L. Ne sous-estimez pas l'impact d'une dose de bar sur votre capacité à conduire.



Pour une personne en bonne santé, le taux d'alcool diminue de 0.1 à 0.15 g/L de sang par heure.

Fabriqué par :
Turdus testers of capacity
770 avenue de la Méridienne
Z.A. Sainte Catherine
48100 Marvejols - FRANCE