

Test de orina de cannabis

• General


El cannabis es un agente alucinógeno que altera la percepción sensorial, la coordinación motora y la memoria. Por lo tanto, cualquier acción que requiera atención se convierte en un riesgo, especialmente la conducción de un vehículo. Los estudios han demostrado que los conductores que han consumido cannabis en las tres horas anteriores tienen un mayor riesgo de sufrir un accidente de tipo colisión. El TEST DE CANNABIS de MEDISUR es una prueba rápida que detecta el consumo de cannabis en 5 minutos y le permite autocontrolarse antes de conducir un vehículo, por ejemplo, o adaptar su comportamiento de consumo.

Cuando una persona consume cannabis, sus derivados químicos se eliminan en la orina. Son estos derivados los que detecta el TEST DE CANNABIS DE MEDISUR.

El TEST DE CANNABIS DE MEDISUR permite realizar la prueba tanto a consumidores ocasionales como a consumidores habituales. Los primeros se pueden detectar en un período de dos a cinco días. Los segundos se pueden detectar durante un período de hasta varias semanas (hasta 10 semanas). Esta capacidad de detectar el consumo de cannabis durante un período de tiempo muy largo es la ventaja de la prueba de orina.

• Contenido de la caja

La caja contiene un prospecto que debe leerse y seguirse atentamente para obtener un resultado fiable, y dos sobres cerrados herméticamente que deben abrirse únicamente en el momento de la prueba, y que contienen: un casete de prueba, una pipeta de plástico de un solo uso y un sobre desecante.

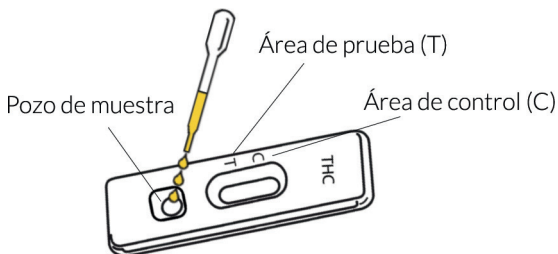

• Precauciones de uso

1. No ingerir el TEST DE CANNABIS DE MEDISUR. 2. Leer atentamente las instrucciones de uso.
3. La prueba debe conservarse entre 2°C y 30°C. No debe congelarse.
4. La prueba debe utilizarse antes de la fecha de caducidad indicada en la caja y en el sobre.
5. La prueba debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Después de su uso, desechar todos los componentes en la basura.

• Procedimiento

1. Recoger un poco de orina en un recipiente limpio (como un vaso de plástico, por ejemplo) desechando el principio.
2. Abrir el sobre de aluminio (por la muesca), sacar únicamente el casete de prueba, colocarlo en una superficie plana y desechar el sobre desecante.
3. Con la pipeta en posición vertical, extraer y depositar 3 gotas de orina en el pozo de muestra.
4. Leer el resultado 5 minutos después de depositar la orina en la ventana de lectura. No interpretar los resultados pasados 10 minutos.

• Interpretación de los resultados


POSITIVO



El test es positivo cuando aparece una sola línea en la ventana de lectura bajo el marcador C (Control). Este resultado significa que la orina contiene derivados de cannabis en concentraciones superiores al umbral por encima del cual se ve perjudicada la atención necesaria para realizar actividades de riesgo.

No deberá realizar ninguna acción que requiera toda su atención o concentración, como conducir un vehículo.

NEGATIVO

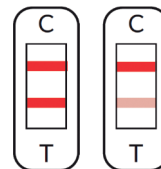


El test es negativo cuando aparecen dos líneas en la ventana de lectura bajo los marcadores T (Test) y C (Control). Esto significa que la orina no contiene ningún producto derivado del cannabis, o que contiene un nivel inferior al umbral de 50

ng/ml.

La intensidad de la línea T puede ser inferior a la de la línea C. Esto no cambia el resultado obtenido.

NO VÁLIDO

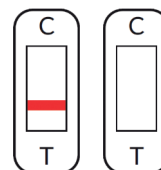

El test no es válido si no aparece ninguna línea o aparece una sola línea en la ventana de lectura bajo el marcador T (Test). En la mayoría de los casos, esto ocurre cuando no se siguen las instrucciones.

Leer atentamente las instrucciones de uso y volver a empezar con un nuevo TEST DE CANNABIS MEDISUR.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

• ¿Cómo funciona el TEST DE ORINA DE CANNABIS de Medisur?

Después del consumo de cannabis, el cuerpo elimina algunos de sus derivados en la orina. Gracias a los anticuerpos capaces de reconocer estos derivados, el TEST DE CANNABIS DE MEDISUR revelará su presencia. Si la concentración de estos derivados es superior a 50 ng/ml, la prueba será positiva.

• ¿Cuándo se puede realizar el test?

La prueba se puede realizar con una muestra de orina obtenida en cualquier momento del día.

• ¿Tengo que seguir una dieta especial?

La ingestión de una cantidad anormal de líquido puede hacer que el test falle. Si el sujeto bebe demasiado el día anterior a la prueba, se obtendrá un falso negativo. Si el sujeto no bebe lo suficiente el día anterior a la prueba, se obtendrá un falso positivo.

• ¿Cuánto tiempo se tarda en detectar el cannabis en la orina?

La orina de un consumidor ocasional será positiva 30 minutos después de su consumo durante un período de dos a cinco días en general. La orina de un consumidor habitual puede conservar rastros de consumo de cannabis durante varias semanas.

• ¿Es posible obtener resultados erróneos?

Para que el test sea fiable, es necesario seguir estrictamente las instrucciones del prospecto.

La cantidad y la calidad de la orina extraída serán decisivas para obtener un resultado correcto. El resultado puede ser erróneo si el casete está mojado antes de la prueba o si la cantidad de orina depositada en el pozo de la muestra del casete no es suficiente. La pipeta de plástico suministrada en la caja permite extraer el volumen adecuado de orina.

• He depositado más de 3 gotas en el pozo. ¿Obtendré un resultado fiable?

Sí, pero es aconsejable respetar el volumen recomendado (3 gotas).

• He depositado menos de 3 gotas en el pozo. ¿Obtendré un resultado fiable?

No. Si el volumen de orina es inferior a 3 gotas, el test puede no ser válido.

• He leído los resultados después de 10 minutos. ¿El resultado es fiable?

No. El resultado debe leerse 5 minutos después de depositar 3 gotas de orina en el pozo del casete de prueba, de acuerdo con las instrucciones de uso del test que figuran en el prospecto.

Pasados 10 minutos, la interpretación del resultado de la prueba ya no es fiable.

• ¿Cómo debe interpretarse la prueba si la intensidad de las líneas T y C son diferentes?

La intensidad de las líneas no tiene importancia para la lectura del resultado. Las líneas solo deben ser homogéneas y continuas.

• ¿Para qué sirve la línea que aparece bajo el marcador C (Control)?

Si aparece la línea debajo de la marca C, la prueba ha funcionado correctamente. Si no aparece la línea debajo de la marca C, la prueba no ha funcionado.

Entonces habrá que volver a realizar una prueba nueva.

• ¿Qué hay que hacer si el resultado es positivo?

Si el resultado es positivo, significa que la prueba ha detectado más de 50 ng/ml de THC en la orina y, por lo tanto, que usted ha consumido cannabis recientemente. No deberá realizar ninguna acción que requiera toda su atención o concentración, como conducir un vehículo. Deje de consumir y vuelva a realizar una prueba varios días después. En caso de consumo regular, el test puede seguir siendo positivo durante varias semanas.

• ¿Qué hay que hacer si el resultado es negativo?

Si el resultado es negativo, no hay que tomar precauciones especiales.

• ¿Cuál es la fiabilidad del TEST DE ORINA DE CANNABIS de Medisur?

La tasa de fiabilidad varía según el límite de detección.

Límite de detección 11-nor- Δ^9 -THC-9 COOH (ng/mL)	Fiabilidad
50	87%
62,5	90%
75	100%

contact@medisur.fr
+33 4 42 96 09 68
www.medisur.fr



MEDISUR
100 Impasse des Houillères
13590 Meyreuil, Francia

ref.CANNA_URI01
rev. 01/2020

