

Nikotin-Test

• Allgemeines

Nikotin, ein natürlicherweise im Tabakblatt enthaltenes Alkaloid, ist eine starke psychostimulierende Substanz, die für das Phänomen der Tabakabhängigkeit verantwortlich ist. Das Vorhandensein von Nikotin im Körper wird hauptsächlich mit dem Konsum von Tabak, elektronischen Zigaretten, Nikotinersatzstoffen oder Passivrauchen in Verbindung gebracht.

Einmal resorbiert, durchläuft Nikotin einen schnellen hepatischen Metabolismus, der zur Bildung zahlreicher Metaboliten, einschließlich Kotinin, führt.

Der Speicheltest TABAKGENUSS SCREENING ist ein spezifischer immunchromatographischer Test, der zum Nachweis von Kotinin (Primärmetabolit von Nikotin) in einer Speichelprobe verwendet wird. Er weist eine Kotinin-Nachweisgrenze von 30ng/mL auf. Dieser Grenzwert von 30ng/mL ermöglicht es im Allgemeinen, Passiv- und Aktivrauchen zu trennen. Andererseits kann ein stark exponierter Passivraucher aufgrund der interindividuellen Variabilität und der assimilierten Menge einen positiven Test vorlegen, und umgekehrt kann ein zurückhaltender Gelegenheitsraucher ein negatives Testergebnis erzielen.

• Inhalt der Verpackung

Die Box enthält das für einen Test erforderliche Material:

- 1 hermetisch versiegelter Aluminiumbeutel mit 1 Siebgerät und 1 Beutel gegen Feuchtigkeit.
- 1 Bedienungsanleitung + 1 Lehrheft

Öffnen Sie den Folienbeutel nur, wenn Sie den Test verwenden.

Der Beutel gegen Feuchtigkeit sollte nicht verwendet werden.

• Vorsichtsmaßnahmen

1. Dieser Test ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. NICHT SCHLUCKEN.

2. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen. Der Test kann nur interpretiert werden, wenn die Gebrauchsanweisung genau befolgt wird. Beachten Sie die angegebenen Zeiten.

3. Zwischen + 2 ° C und + 30 ° C lagern. Nicht einfrieren.

4. Nicht nach dem auf dem Etikett und auf der Schutzhülle angegebenen Verfallsdatum oder bei Beschädigung verwenden.

5. Verwenden Sie diesen Test nicht erneut.

6. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.


7. Entsorgen Sie nach Gebrauch alle Komponenten im Papierkorb.

• Vorgehensweise

1. Essen, rauchen oder trinken Sie 10 Minuten vor dem Test nicht.

2. Verwenden Sie das Gerät direkt nach dem Öffnen des Beutels.

3. Entfernen Sie die Kappe vom Test, setzen Sie den Sammler in den Mund und fegen Sie ihn in den Mund (Wangen, Zahnfleisch, Zunge).

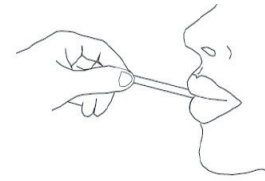

4. Im Mund belassen, bis eine rosa Wanderung auftritt (ca. 1 Minute).




5. Mit der Kappe schließen und 10 Minuten flach legen, dann die Ergebnisse interpretieren.

Nicht länger als 20 Minuten interpretieren.

• Bewertung der Ergebnisse


POSITIV

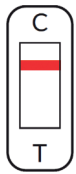

Der Test ist positiv, wenn ein einzelner Streifen im Wiedergabefenster unter der Markierung C (Control) erscheint. Dieses Ergebnis bedeutet, dass der Urin Cannabis-Derivate in einer Konzentration oberhalb der Schwelle enthält, ab der die Aufmerksamkeit bei Risiko-Aktivitäten beeinträchtigt ist. Sie sollten keine

Handlungen vornehmen, die Ihre volle Aufmerksamkeit oder Konzentration erfordern, wie zum Beispiel das Führen eines Fahrzeugs.


NEGATIVO

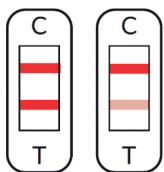

Der Test ist negativ, wenn zwei Streifen im Lesefenster unter den Markierungen T (Test) und C (Kontrolle) erscheinen. Dies bedeutet, dass der Urin keine Cannabis-Derivate enthält oder dass er einen Gehalt an Cannabis-Derivaten unterhalb

der Schwelle von 75 Mikrogramm/Liter aufweist. Die Intensität der T-Linie kann geringer sein als die Intensität der C-Linie. Dies hat keinen Einfluss auf das erzielte Ergebnis.

UNGÜLTIG

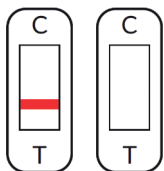

Der Test ist ungültig, wenn kein Streifen erscheint oder wenn ein einzelner Streifen im Wiedergabefenster unter der Markierung T (Test) erscheint. Dies tritt am häufigsten dann auf, wenn die Anweisungen in der Packungsbeilage

nicht befolgt wurden. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und verwenden Sie einen neuen CANNABIS MEDISUR TEST.



contact@medisur.fr
+33 4 42 96 09 68
www.medisur.fr



MEDISUR
100 Impasse des Houillères
13590 Meyreuil, Frankreich

ref.NICO_01
rev. 01/2020

 JEUNE ENTREPRISE
FRANÇAISE